



Instructions Igenity® pour prélèvement de sang


Deux à trois gouttes de sang sont requises sur la portion de collecte de la carte. Elles peuvent être prélevées n'importe où sur l'animal. Il y a deux endroits où il est facile de trouver des vaisseaux sanguins : les oreilles et sous la queue.



1. Il est nécessaire de bien restreindre l'animal. Trouvez visuellement ou par palpation le vaisseau sanguin. Nettoyez la zone, afin que le prélèvement ne soit pas contaminé par de la saleté ou du fumier. Utilisez une aiguille propre ou une lancette pour chaque animal.



2. Le sang peut également être prélevé, de la veine sous la queue, avec une seringue ou un tube pour prélèvement sanguin. Cela peut s'avérer plus simple que de prélever du sang de la veine de l'oreille, laquelle est recouverte de poils longs épais.

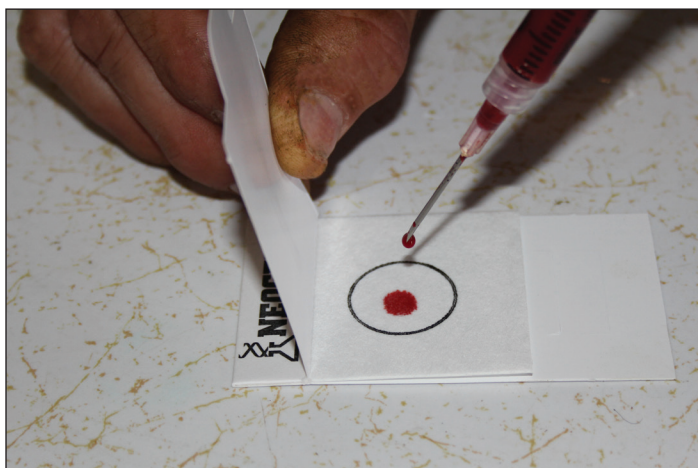

3. Prélevez deux à trois gouttes de sang sur la portion de collecte de la carte, tout en permettant au sang de s'égoutter ou d'émettre un jet sur la carte. N'essayez pas l'aiguille, l'oreille ou la queue sur la carte de collection. Jetez l'aiguille dans un contenant prévu à cette fin.



4. Avant de mettre les gouttes de sang sur les cartes de collection, veuillez inscrire le bon nom du client et l'ID de l'animal dans les espaces prévus à cet effet. Laissez les cartes ouvertes et séchez à l'air libre avant de refermer la languette.



Neogen Canada
4244 – 10230 Jasper Avenue
Edmonton, AB T5J 4P6

